

РЕЖИМ ТЕКУЩЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ

«ДЕЛЬСАН-ОКСИ»

(выписка из инструкции № 2/14 от 15.07.14г по применению средства «Дельсан-Окси»)

Объект	При бактериальных инфекциях для палатных отделений, кабинетов поликлиник и стационаров (кроме манипуляционных кабинетов) для ЛПУ любого профиля, кроме инфекционного		При вирусных инфекциях для помещений ЛПУ классов чистоты А и Б (операционные, перевязочные, родильные залы, процедурные, манипуляционные, стерилизационные и т.д.)		Способ применения
	Концентрация, экспозиция	Способ приготовления 1 литра рабочего раствора	Концентрация, экспозиция	Способ приготовления 1 литра рабочего раствора	
Текущая уборка					
Поверхности (оборудование, мебель, стены, двери, полы)	0,5% - 30 минут	5 мл Дельсан-Окси 995 мл воды	3,0% - 60 минут	30 мл Дельсан-Окси 970 мл воды	Протирание, расход 100 мл на кв.м.
Санитарно-техническое оборудование	0,5% - 60 минут	5 мл Дельсан-Окси 995 мл воды	3,0% - 60 минут	30 мл Дельсан-Окси 970 мл воды	Протирание, расход 150 мл на кв.м., после экспозиции – смыть водой
Уборочный инвентарь	1,0% - 60 минут	10 мл Дельсан-Окси 990 мл воды	2,0% - 60 минут	20 мл Дельсан-Окси 980 мл воды	Замачивание, после экспозиции ополаскивание и сушка
Предметы ухода за больным	0,5% - 60 минут	5 мл Дельсан-Окси 995 мл воды	3,0% - 120 минут	30 мл Дельсан-Окси 970 мл воды	Протирание или погружение, после экспозиции ополаскивание и сушка
Генеральная уборка					
Генеральная уборка	0,5% - 30 минут	5 мл Дельсан-Окси 995 мл воды	3,0% - 60 минут	30 мл Дельсан-Окси 970 мл воды	Протирание, расход 100 мл на кв.м.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности рабочих растворов 14 дней, растворы для дезинфекции ИМН можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился (при изменении цвета, помутнения раствора и т.п. раствор необходимо заменить).
- Все емкости с дез.средствами должны быть снабжены крышками, иметь маркировку (наименование, концентрация, назначение средства; дата приготовления, предельный срок годности).



РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН-ОКСИ»

(выписка из инструкции № 2/14 от 15.07.14г. по применению средства «Дельсан-Окси»)

Объект	Концентрация, экспозиция	Способ приготовления 1 литра рабочего раствора	Применение
Дезинфекция изделий медицинского назначения			
Дезинфекция совмещенная с ПСО изделий медицинского назначения многократного применения (кроме эндоскопов и инструментов к ним)	5% экспозиция 60 минут	50 мл Дельсан-Окси 950 мл воды	Замачивание при полном погружении, после экспозиции мойка, ополаскивание и сушка
Дезинфекция медицинских отходов класса Б			
Изделия однократного использования – инструменты, накладки, шапочки, белье, ватные тампоны, салфетки и др.	4% экспозиция 60 минут	40 мл Дельсан-Окси 960 мл воды	Замачивание с последующей утилизацией
Генеральная уборка			
Помещения ЛПУ классов чистоты А и Б (операционные, перевязочные, родильные залы, процедурные, манипуляционные, стерилизационные и т.д.)	3,0% - 60 минут	30 мл Дельсан-Окси 970 мл воды	Протирание (расход 100 мл на кв.м.), после экспозиции – поверхности протереть чистыми тканевыми салфетками, затем провести обеззараживание воздуха
Палатные отделения, кабинеты поликлиник и стационаров (кроме манипуляционных) для ЛПУ любого профиля, кроме инфекционного	0,5% - 30 минут	5 мл Дельсан-Окси 995 мл воды	

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Срок годности рабочих растворов 14 дней, растворы можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился (при изменении цвета, помутнения раствора и т.п. раствор необходимо заменить).
- Все емкости с дез.средствами должны быть снабжены крышками, иметь маркировку (наименование, концентрация, назначение средства; дата приготовления, предельный срок годности)

